

クリアフィル®クラブ 通信

Vol.3

「ADポストII」について

Q1 「ADポストII」の成分を教えてください。

A 「ADポストII」は、JIS規格のステンレス鋼SUS316Lです。SUS316Lは鉄(Fe)にクロム(Cr)、ニッケル(Ni)、モリブデン(Mo)、マンガン(Mn)、ケイ素(Si)、リン(P)、炭素(C)、硫黄(S)を加えた合金鋼です。


Q2 ポスト用のドライバーがセットに入っていないようですが。

A 「ADポストII」は、スクリュータイプ(ねじこみ式)ではございませんので、ドライバーは必要ありません。本品を植立する際の形成用ドリルは、ピーソーリーマー(メルファー社製ピーソールゴリーマー)を用いてください。本品のポスト径は、ポストのナンバーと同ナンバーのピーソーリーマーより若干小さく設定しています。歯科接着用レジンセメントや歯科用支台築造材料などと組み合わせて植立します。



Q3 セットケースの中央のスペースには何も入っていませんが、ここは何のためのスペースですか？

A 根管形成で使用するピーソーリーマーを立てるなどしてご利用ください。

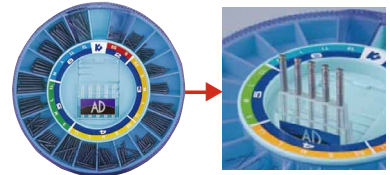

Q4 「ADポストII」に手指などが触れた場合には、どのようにしたら良いですか？

A アルコール綿で拭き取ってください。

ADポストII 管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品
医療機器承認番号:20600BZZ01004000



●寸法表

ポスト径	0.84mm	1.04mm	1.24mm	1.44mm	1.64mm
8.0mm	2SS	3SS	4SS		
10.0mm	2S	3S	4S	5S	
12.0mm		3M	4M	5M	6M
14.0mm		3L	4L	5L	6L
16.5mm		3LL	4LL	5LL	6LL
18.0mm					6EL

【セット】【フルサイズセット】

・全20種類×12本 (2SS,2S,3SS,3S,3M,3L,3LL,4SS,4S,4M,4L,4LL,5S,5M,5L,5LL,6M,6L,6LL,6EL)

【単品】

・単品各12本 (2SS,2S,3SS,3S,3M,3L,3LL,4SS,4S,4M,4L,4LL,5S,5M,5L,5LL,6M,6L,6LL,6EL)

●ご使用に際しましては、必ず製品の添付文書及び取扱説明書をお読みください。



クリアフィル®クラブ

クラレ製品の使い方動画も
見れる「クリアフィルクラブ」 <http://clearfil.dental-plaza.com/>



製造販売 クラレノリタケ デンタル株式会社 新潟県胎内市倉敷町2-28 〒959-2653
www.kuraraynoritake.jp

販売 株式会社モリタ 大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 Tel:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 Tel:03-3834-6161