

クリアフィル® クラブ 通信

Vol.25

「クリアフィル® ボンド SE ONE」

「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」新発売

2011年11月「クリアフィル® ボンド SE ONE」「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」が発売になりました。今回この新製品の特徴をQ&A形式でご紹介します。



クリアフィル® ボンド SE ONE

管理医療機器 歯科用象牙質接着材
(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)
医療機器認証番号:223ABBZX00085000



クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE

管理医療機器 歯科用支台築造材料
医療機器認証番号:223ABBZX00086000

Q1 「クリアフィル® ボンド SE ONE」の意味は？

A SEは、self etching:「セルフエッチング」、ONEは「1液」を表します。

冷蔵庫に
これ1本!



Q2 「クリアフィル® ボンド SE ONE」は、「クリアフィル® ポーセレンボンド アクティベーター」との混和はできますか？

A 可能です。等量混和液は塗り分けする必要がありませんので歯質を含む口腔内リペアにも対応可能です。また、歯科用陶材、セラミックスあるいは、無機物フィラーを含むレジン系材料で作製された歯冠修復物の表面処理に有効な「シランカップリング材」として機能します。



クリアフィル® ポーセレンボンド アクティベーター

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料
(歯科金属用接着材料)(歯科用象牙質接着材)(歯面処理材)
医療機器承認番号:16300BZ00085000

Q3 「クリアフィル® ボンド SE ONE」と「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」の保管方法を教えてください。

A どちらも2～8℃の冷蔵庫で保管していただき、直射日光やデンタルライト等の強い光があたる場所は避けてください。火気の近くにも保存しないでください。

Q4 「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」には、「クリアフィル® ボンド SE ONE」以外のボンドは使用できないのでしょうか？

A デュアルキュア型および化学重合型のボンドの使用が可能です。


各支台築造用レジンと ボンディング材の 組合せ表	クリアフィル® ボンド SE ONE	クリアフィル トライエスボンド® ND	クリアフィル® メガボンド® クリアフィル® メガボンド® FA	クリアフィル® DC ボンド	クリアフィル® ライナーボンド IIΣ	クリアフィル® フォトボンド クリアフィル® ニューボンド
クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE	○ 注)1	× 注)2	× 注)2	○	○	○
クリアフィル® DCコア ペースト クリアフィル® DCコア オートミックス	×	×	×	○	○	○
クリアフィル® フォトコア	○	○	○	○	○	○
クリアフィル® コア	×	×	×	○	○	○
各社デュアルキュア型 支台築造用レジン	×	×	×	○	○	○

注)1 【「クリアフィル® ボンド SE ONE」と「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」の場合】
「クリアフィル® ボンド SE ONE」と「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」に相互に入っている触媒が化学重合する為。
注)2 【光重合型ボンドの場合】
光が十分に届かず壁部や深部の重合は不十分になる。



Q5 なぜ、コアの接着にはデュアルキュア型や化学重合型のボンドが必要なのですか？

A 根管内（特に深い箇所や近心壁部）は光が十分に届かない部分があります。光が十分に届かない症例には、やはりデュアルキュア型や化学重合型のボンディング材が必要です。ただし、「クリアフィル® ボンド SE ONE」は「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」と接触硬化しますので、お使いいただくことができます。

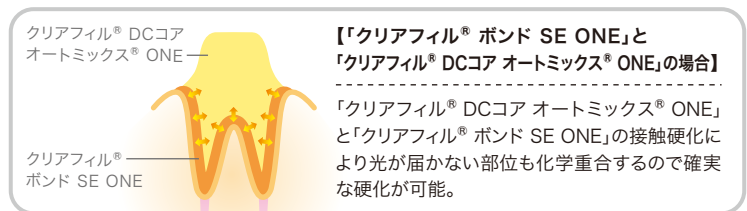

Q6 「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」のミキシングチップ、ガイドチップは別売りしているのですか？

A はい、別売りしております。ミキシングチップは20個入り、ガイドチップは(太)(細)の2種類がありそれぞれ20個入りです。

- クリアフィル® メガボンド® 管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科金属用接着材料)(歯科セラミックス用接着材料) 医療機器承認番号：21000BZZ00484000
- クリアフィル トライエスボンド® ND 管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科金属用接着材料)(歯科セラミックス用接着材料) 医療機器承認番号：222ABBZX00088000
- クリアフィル® メガボンド® FA 高度管理医療機器 医薬品含有歯科用象牙質接着材 医療機器承認番号：21700BZZ00442000
- クリアフィル® DC ボンド 管理医療機器 歯科用象牙質接着材 医療機器承認番号：218ABBZX00039000
- クリアフィル® ライナーボンドIIΣ 管理医療機器 歯科用象牙質接着材 医療機器承認番号：20900BZZ00925000
- クリアフィル® フォトボンド ボンディングエイジェント 管理医療機器 歯科用象牙質接着材 医療機器承認番号：21200BZZ00360000
- クリアフィル® ニューボンド 管理医療機器 歯科用象牙質接着材 医療機器承認番号：15800BZZ01534000
- クリアフィル® DC コア オートミックス® 管理医療機器 歯科用支台築造材料 医療機器承認番号：218ABBZX00040000
- クリアフィル® DC コア ペースト 管理医療機器 歯科用支台築造材料 医療機器承認番号：21200BZZ00359000
- クリアフィル® フォトコア® 管理医療機器 歯科用支台築造材料キット 医療機器承認番号：16100BZZ01450000
- クリアフィル® コア 管理医療機器 歯科用支台築造材料 医療機器承認番号：21800BZZ10036000

●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。



クラレ製品の使い方動画も
見える「クリアフィルクラブ」 <http://clearfil.dental-plaza.com/>



製造販売 クラレノリタケ デンタル株式会社 新潟県胎内市金敷町2-28 〒959-2653 www.kurarenoritake.jp

販売 株式会社モリタ 大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 Tel:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 Tel:03-3834-6161

www.dental-plaza.com