

TMD通信

—ティースメイト® ディセンシタイザー通信—


Vol. 1

速報! 「ティースメイト® ディセンシタイザー」アンケート評価発表!

発売以来反響の大きい「ティースメイト® ディセンシタイザー」ですが、「他の先生はどう思っているの??」「まだ使ってないけどどれだけ効果があるんだろう...?」等々、皆様が気になる部分があると思います。そこで一人でも多くの先生方に製品の性能や使い方などをお伝えする「TMD通信(ティースメイト® ディセンシタイザー通信)」を開始しました。第一号となる今回は発売前後に調査しましたアンケート結果を速報でお伝えします。

●実際に製品を使用されて効果を感じられましたか?


評価 ① 発売前のモニタリング調査にて

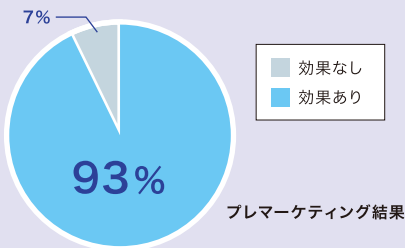

発売前のプレマーケティングで
93%のDr.が効果ありと回答。

対象人数 **284名** 期間 **2012年6月~7月**

評価 ② 発売後の聞き取り調査にて(株式会社モリタ 実施)

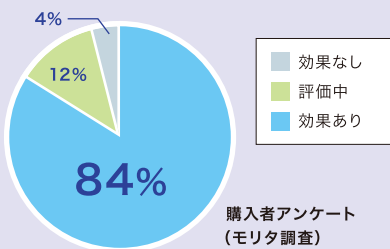


購入者への聞き取り調査で
96%のDr.が効果ありと回答。

評価中は「耐久性の評価待ち」との回答が多かった。

対象人数 **56名** 期間 **2012年8月~9月**

評価 ③ 製品同封のアンケートハガキより(クラレノリタケデンタル株式会社 実施)

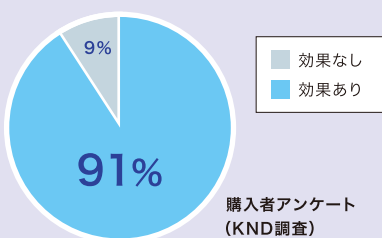

購入者からの返信はがきで
91%のDr.が効果ありと回答。

対象人数 **58名** 期間 **2012年8月~9月**

上手く
使えない...



大変うれしい結果です!!...が...

なぜ効果がでない人もいるのだろう?
その原因は...



「ティースメイト® ディセンシタイザー」を有効にお使いいただくための5つのポイント

POINT

1

「こすり塗り」の回数

30秒の擦り込みが重要です。1回塗りで効果がなかった場合は2回塗りをお試しください。

プレマーケティング結果では93%のDr. が2回塗りでも効果ありと報告されています。現在ご使用中の先生の中にはこのこすり塗りの時間を患者様への説明の時間とされている先生もいらっしゃいます。



写真提供: ばんだ歯科 須崎明先生

POINT

2

塗布が難しい部分への「こすり塗り」

遠心部や歯間部等は歯間ブラシ等を用いて確実に擦り込んで下さい。

「ティースメイトディセンシタイザー」のペーストのpHは約10と弱アルカリ性です。そのため歯肉に付着しても痛みや白変を起こすことはありません。塗布が難しい部分でも歯肉への付着を気にせずご使用ください。また付属のマイクロブラシ以外にも歯間ブラシや綿球、ラバーカップでも塗布可能です！



写真提供: 蒼田歯科診療所 蒼田雄司先生

POINT

3

製品の混和

必ず規定の割り合いで混和するようにし、適度な稠度のペーストになるようにしてください。

粉と液の割り合いが規定範囲でなければ、適度な稠度のペーストになりません。また混和時には付属のアプリケーターブラシでかたまりがなくなるよう押しつぶすように混和することをオススメします。



写真提供: 蒼田歯科診療所 蒼田雄司先生

POINT

4

水洗の方法

余剰ペーストは弱圧で洗い流してください。

余剰ペースト水洗の際はなるべく弱圧のウォーターシリンジで洗い流してください。エアースプレーは使用しないようにしてください。



写真提供: 恵愛歯科 柏田聡明先生

POINT

5

患者様の状態について

咬合圧の強い患者様、ブラキシズムの強い患者様には効き目が弱い可能性があります。また知覚過敏の発生部位が明確でない場合には周辺の歯質への塗布をオススメします。

1セットで約150歯への使用が可能です。

ティースメイト® ディセンシタイザー 管理医療機器 歯科用知覚過敏抑制材料 医療機器認証番号: 224ABBZX00014000

● ご使用に際しましては、必ず製品の添付文書及び取扱説明書をお読みください。



クリアフィル®クラブ

クラレ製品の使い方動画も
見れる「クリアフィルクラブ」 <http://clearfil.dental-plaza.com/>



製造販売 クラレノリタケ デンタル株式会社 新潟県胎内市倉敷町2-28 〒959-2653
www.kuraraynoritake.jp

販売 株式会社モリタ 大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 Tel:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 Tel:03-3834-6161

www.dental-plaza.com