

# クリアフィル®クラブ 通信

Vol.4

## 「クリアフィル® SA ルーティング」について

### Q1 ペーストの一歯あたりの使用量はどのくらいですか。

**A** 一歯あたりの使用量の目安としてはクラウンでは約5ミリ、インレーでは約2.5ミリを目安にご使用ください。また、このたび目盛り付き練和紙を発売いたしました。5ミリ刻みの目盛りがついておりますので、ぜひご利用ください。




これで解決!

- 【目盛り付き練和紙】
- #915
  - 目盛り付き練和紙
  - 50枚綴り/59mm×83mm



### Q2 ペーストが先端で硬化してしまって、採取できません。

**A** キャップを閉める際に向きを間違えた場合などに、Aペースト・Bペーストが接触し、シリンジ先端部のペーストが固化することがありますので、シリンジの先端がペーストで汚れた場合は乾いたガーゼ等で拭き取ってからキャップを締めてください。また、このようなキャップの逆閉めを防止する為に、シールの配布を行っております。送付をご希望の際は、お問い合わせ専用フリーダイヤルにてお申しつけください。

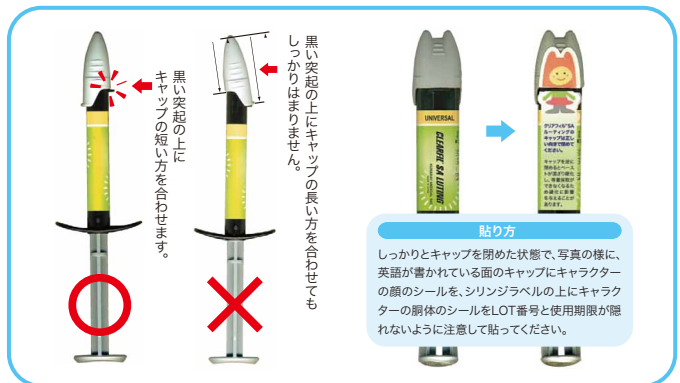

### クリアフィル® SA ルーティング

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント  
医療機器認証番号：219ABBZX00311000

【バリューキット】 [ユニバーサル]

・Aペースト 4.4g (2.5mL) ・Bペースト 4.2g (2.5mL) 3本  
付属品/練和棒、練和紙 各1個

【ペースト単品】

・Aペースト 4.4g (2.5mL) ・Bペースト 4.2g (2.5mL) 1本



●ご使用に際しましては、必ず製品の添付文書及び取扱説明書をお読みください。



クリアフィル®クラブ

クラレ製品の使い方動画も  
見える「クリアフィルクラブ」 <http://clearfil.dental-plaza.com/>



製造販売 クラレノリタケ デンタル株式会社 新潟県胎内市倉敷町2-28 〒959-2653  
www.kurarenoritake.jp

販売 株式会社モリタ 大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 Tel:06-6380-2525  
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 Tel:03-3834-6161