

クリアフィル®クラブ 通信

Vol.6

「クリアフィル® ファイバーポスト」新発売

2010年2月に発売いたしました「クリアフィル® ファイバーポスト」ですが、おかげさまでたくさんのご質問をいただいております。「クリアフィル® ファイバーポスト」や関連製品に関するご質問をご紹介します。

クリアフィル® ファイバーポスト

管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品
医療機器認証番号:221ABBZX00166000



Q1 「クリアフィル® ファイバーポスト」の特徴を教えてください。

A クラレノリタケデンタル独自の形状で強度、適合性、接着性に優れています。



よく考えて作られているんだね。

症例写真提供:
日野歯科医院 日野年澄先生
株式会社カスプデンタルサプライ/
カナレテクニカルセンター 山田和伸先生




胴体部分はポスト自身の強度を考慮したストレートな形状

根尖への移行部は歯根の形状を考慮したテーパ型

根尖部へはレジンコアとの接着性(機械的嵌合)を考慮し溝を付与

Q2 「クリアフィル® ファイバーポスト」のサイズを教えてください。

A 下記のとおりです。

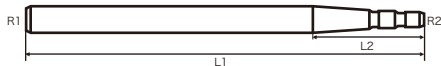

| 品名 | L1 | L2 | R1(φ) | R2(φ) |
|------|----|----|-------|-------|
| No.3 | 18 | 5 | 1.04 | 0.6 |
| No.4 | 18 | 5 | 1.24 | 0.6 |
| No.5 | 18 | 5 | 1.44 | 0.7 |
| No.6 | 18 | 6 | 1.64 | 0.8 |

単位:mm

4種類のサイズがあるよ!



Q3 「クリアフィル® ファイバーポスト」の長さの調節はどのように行うのですか?

A 長さ調節にはダイヤモンドディスクを使用してください。(右図参照) はさみや円盤状のカーボランダム、ファイバーカッターを使用するとポストを押しつぶしてしまい断面の荒れやファイバーがほぐれてしまう恐れがあります。また調節は必ず植立前におこなってください。



Q4 「クリアフィル® ファイバーポスト」に使用期限はあるのですか?

A 製品の梱包材に使用期限を記載しておりますので、使用前に必ずご確認ください。

※製品の使用期限についての詳しい資料は
クリアフィル®クラブ通信 Vol.1をご覧ください。



Q5 「クリアフィル® ファイバーポスト」スターターセットにポスト孔形成用ドリルは含まれていますか？

A ドリルは含まれておりません。ポスト孔の形成にはポストと同じNO.のピーソリマーをご使用ください。

Q6 「クリアフィル® ファイバーポスト」表面にサンドブラストは必要ですか？

A ポスト表面が損傷され、強度が低下してしまいますので、絶対に行わないでください。

Q7 「クリアフィル® ファイバーポスト」は、X線造影性はありますか？

A ございません。

Q8 「クリアフィル® ファイバーポスト」にセラミックス処理（シランカップリング処理/シラン処理）は必要ですか？

A 「クリアフィル® ファイバーポスト」と支台築造用レジンとの化学的結合が高まるので必ず行ってください。グラスファイバーポストへの表面処理が不要な歯科接着用レジンセメント（例えば「クリアフィル® SA ルーティング」等）の場合は必要ありません。

Q9 「クリアフィル® ファイバーポスト」のセラミックス処理の手順を教えてください。

A 下記の手順で行ってください。

セラミックス処理材（シランカップリング処理材）の使用手順

※「クリアフィル® ファイバーポスト」の添付文書に記載の使用方法「本品の表面処理」を示します。

1 リン酸エッチング



K エッチャント GEL

管理医療機器 歯科用エッチング材
医療機器認証番号: 16100BZZ01130000

2 セラミックス処理材の塗布



クリアフィル® セラミック プライマー

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料
医療機器認証番号: 218ABBZX00041000

セラミックス処理
(シランカップリング処理)
についての詳しい資料は
クリアフィル® クラブ 通信
Vol.2をご覧ください。



●ご使用に際しましては、必ず製品の添付文書及び取扱説明書をお読みください。



クリアフィル® クラブ

クラレ製品の使い方動画も
見れる「クリアフィルクラブ」 <http://clearfil.dental-plaza.com/>



製造販売 クラレノリタケ デンタル株式会社 新潟県胎内市金敷町2-28 〒959-2653 www.kuraraynoritake.jp

販売 株式会社モリタ 大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 Tel:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 Tel:03-3834-6161

www.dental-plaza.com