

クリアフィル®クラブ 通信

Vol.8

「ADゲル」について

Q1 「ADゲル」とはどういう商品ですか？

A 使用目的が「歯と歯科用接着性セメント又は歯科充填用コンポジットレジンとの接着増強」の次亜塩素酸ナトリウムを主成分としたゲル状の医薬品含有歯面処理材です。

Q2 次亜塩素酸ナトリウムの濃度は何%ですか？

A 約10～15%です。そのためQ8もご参照ください。



Q3 採取したときにサラサラしていたりドロドロしていたり、液状が安定していません。このようなときはどうしたらいいですか？

A 毎回ご使用前にアプリケーターのキャップを締めた状態で3～5回強く振ってからご使用ください。

Q4 アプリケーターがつまってしまいます。

A 増粘剤がつまる事がありますので毎回ご使用前にアプリケーターのキャップを締めた状態で3～5回強く振ってからご使用してください。また保管中にキャップが緩んだ状態ですとアプリケーター内で成分が乾燥してしまうため、より詰まりやすくなります。ご使用後はキャップをきっちりお締め下さい。

Q5 詰まってしまったアプリケーターを使うことは出来ませんか？


A 無理に押し出すと、中身が飛び出す恐れがあります。詰まってしまった場合には別売のアプリケーターと交換して下さい。クラレノリタケデンタルWEBサイト『動画で見る製品』のコーナーをご覧ください。



#919 アプリケーター 25個入り

Q6 アプリケーターが付いていますが、これは直接口腔内に使用できるのでしょうか？

A いいえ。このアプリケーターは口腔内へ使用するためのものではなく、混和皿に採取するためのものです。「ADゲル」は軟組織に付着すると熱傷等を引き起こすことがあります。(詳しくはQ8をご覧ください。)このようなことを防ぐために、**象牙質面への塗布に際してアプリケーターを使用することは絶対にお避けください。**「ADゲル」は必ず混和皿に採取した後に、スポンジで象牙質面に塗布してください。

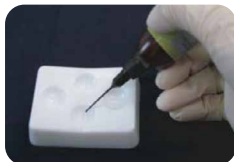

Q7 他の製品より使用期限が短いように思います。

A 次亜塩素酸ナトリウムを安定した状態でご使用いただくために他の製品と比較すると使用期限は短い設定となっておりますのでご了承ください。なお、使用期限は製造から12ヶ月です。
保存方法は2～8℃の冷蔵保存です。(室温保存は劣化が早まりますので必ず冷蔵保存して下さい。)

Q8 ADゲルを使用するにあたり、注意すべき点はありますか？

A ADゲルには腐食性がありますので、軟組織、皮膚、衣服等に付着させないように十分に注意して下さい。ADゲルが付着した場合は、オキシドールを浸した脱脂綿で拭き取り十分に水洗して下さい。付着した場合には、“痛み”や“熱傷”等が伴うことがあります。また、目に入った場合には、ただちに多量の水で水洗し、眼科医の診断を受けて下さい。

基本的な使用方法



- 1 通法にしたがい、歯の清掃を行います。**
- 2 エッチング処理**
 - ① 「K エッチャント GEL」の添付文書にしたがい象牙質面に塗布し、10秒～30秒間処理します。
 - ② 処理後、水洗、乾燥を行います。
- 3 「ADゲル」処理**
 - ① 本材のキャップを取った後、容器にアプリケーターを取り付け、必ず混和皿に採取して、スポンジ等で象牙質面に塗布し、60秒間処理します。
 - ② 処理後、水洗、乾燥を行います。
- 4 合着操作**
歯科用レジンセメントの添付文書にしたがいクラウン、インレー等の歯冠修復物の合着を行います。



クイズ

「ADゲル」の特徴として正しいものはどれとどれでしょう。

- a. 主にエナメル質(無機質)へ作用
- b. 主に象牙質(有機質)へ作用
- c. 強く振ってから使用する
- d. プライマー作用あり

A b,c



ADゲル

高度管理医療機器 医薬品含有歯面処理材
医療機器承認番号:20500BZZ01050000

●ご使用に際しましては、必ず製品の添付文書及び取扱説明書をお読みください。



クラレ製品の使い方動画も見える「クリアフィルクラブ」 <http://clearfil.dental-plaza.com/>



製造販売 クラレノリタケ デンタル株式会社 新潟県胎内市金敷町2-28 〒959-2653 www.kuraranoritake.jp

販売 **株式会社モリタ** 大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 Tel:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 Tel:03-3834-6161

www.dental-plaza.com