

クリアフィル®クラブ 通信

Vol.9

「ホワイトコート」について

今回は、「ホワイトコート」の導入を検討されている先生方からお寄せいただきましたご質問にお答えいたします。

製品名について

「ホワイトコート」は、『患者様のご希望の色を』『その日のうちに施術を完了できる』歯面コーティング材です。
(施術後、3ヶ月以内に1回以上の検診が必要です。)

金属、変色歯などにも使用可能です。

すぐに
希望の色調を
試せる

気になっている金属の被せ物や変色した歯を時間をかけずに目立たないようにしたいのですが...



「ホワイトコート」ならできます！
今すぐに金属の被せ物の上に塗って試せますよ。

補修時にはハンドスクレーラーや探針で除去します。

すぐに補修
できる

前回塗ってもらったものも良かったけれど、次はもう一段階白い色調にしてみたいわ。



今付いている「ホワイトコート」はハンドスクレーラーなどで除去して補修できますよ。全部で9つの色調がありますから、次は違う色調にしてみましょう。




歯面清掃、
歯面研磨後に
塗布できる

歯を簡単に希望の色調にしたいのだけれど、レジン充填のように使用するのですか？



「ホワイトコート」は、歯質に用いる場合、歯面清掃、歯面研磨を行ってから「ホワイトコート プライマー」「ホワイトコート ベースコート」「ホワイトコート トップコート」の順で塗布します。変色歯の場合も同様です。

カラーチャート

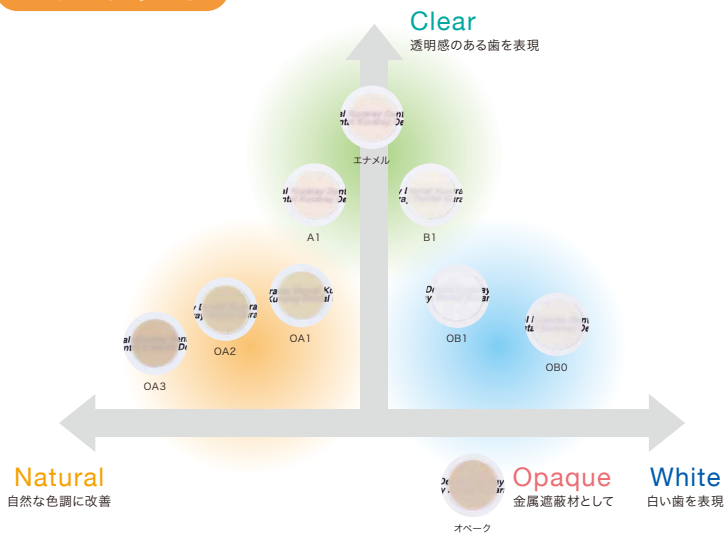

ホワイトコート

管理医療機器 歯面コーティング材(歯科用色調遮蔽材料)
医療機器承認番号:21500BZZ00596000

主な活用方法について

短期間のうちに
歯の色調を変えたい場合に

審美歯科治療は、ある程度まとまった時間が必要になることが多いです。一方、「ホワイトコート」は、「その日のうちに施術を完了」できる材料です。そのため、治療にまとまった時間が取れない場合でも「ホワイトコート」では対応可能です。

「ホワイトコート」で希望の色調を体験し、
その後、長期的な補綴物へ

「ホワイトコート」を用いて、患者様にその場で希望の歯の色調を体験していただけます。しかし、「ホワイトコート」を塗布した後は、3ヶ月に1回以上の検診を行いながら修復を行いますので、患者様のご希望によっては「ホワイトコート」を終了し、セラミックスなどの長期的に装着可能な審美歯科治療へ移行していただくことも可能です。

口腔内の色調の調和を
はかるために

歯質漂白処置（ブリーチング）後や充填したコンポジットレジンの変色により、口腔内の部分的な歯牙の色調が気になる場合にも、「ホワイトコート」を塗布することで、希望の色調に整えることが可能です。

「ホワイトコート」に関するQ&A

Q1 どのような照射器が使用できますか？

A 従来型ハロゲン照射器、高出力ハロゲン照射器、プラズマアーク照射器が使用可能です。LED照射器はご使用になれませんのでご注意ください。使用可能な歯科重合用光照射器の条件の詳細につきましては、製品の添付文書をご確認ください。

Q2 納品されたらすぐに使用できますか？

A 「ホワイトコート」は、塗布にコツが必要な材料です。模型などを用いて塗布の練習を行ってから患者様へ用いることをお勧めします。製品の使用方法や製品に関する注意事項につきましては、予め製品の添付文書をご確認いただきますようお願いいたします。また、詳しい使い方やテクニックについての講習会もございますので是非ご参加ください。（ホワイトコート講習会についてのお問合せは、株式会社モリタ 東京本社（03-3834-6164）または、大阪本社（06-6380-2525）までお願いします。）

Q3 患者様への提供価格はどのくらいですか？

A 「ホワイトコート」は、保険適用材料ではありませんので、歯科医院様で自由にご設定していただくことができます。多くの歯科医院様は、ホームページで料金のご案内を実施されているようです。

Q4 適用部位はどこですか？

A 咬合接触しない全ての部位が適用部位です。3+3の6歯の頬側面への塗布が一般的です。

Q5 「ホワイトコート」を天然歯に塗布する前に、リン酸エッチング処理を行っても問題はありますか？

A リン酸エッチング処理を行うと歯質への接着が強固となり、補修時などに「ホワイトコート」の除去が困難になりますので、リン酸エッチング処理は行わないでください。ただし、やむを得ず咬合接触部位を含む部位に適用する場合は、「ホワイトコート プライマー」で処理する前にリン酸エッチング処理を行います。

Q6 漂白後の歯にも使用できますか？

A 歯質漂白処置（ブリーチング）を行った後は、歯の色が安定し本品の接着強さが回復する1週間以降に適用してください。

Q7 どこに保管すれば良いですか？

A 2~8℃の冷蔵保管していただき、直射日光やデンタルライト等の強い光が当たる場所は避けてください。

Q8 「ホワイトコート ベースコート」の使用回数はどのくらいですか？

A 「ホワイトコート ベースコート」シリンジ1本あたり約72歯分です。

Q9 ガイドチップの種類とミキシングチップについて教えてください。

A 「ホワイトコート ベースコート」は、小筆を用いる方法とインストゥルメントを使用する方法があります。詳しくは動画のページをご覧ください。

 クラレノリタケデンタルWEBサイト『動画で見る製品』のコーナーをご覧ください。

●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。 ●印刷のため現品と色調が異なることがあります。 ●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。



クリアフィル® クラブ

クリア製品の使い方動画も
見れる「クリアフィルクラブ」 <http://clearfil.dental-plaza.com/>



製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社 新潟県胎内市金敷町2-28 〒959-2653 www.kurarenoritake.jp

販売 株式会社モリタ 大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 Tel:06-6380-2525 東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 Tel:03-3834-6161

www.dental-plaza.com