

クリアフィル®クラブ 通信

Vol. 19

「クラリベース® キット」について



2009年5月より
ご愛顧いただいております、
「クラリベース® キット」を
改めてご案内いたします。

クラリベース® キット

管理医療機器 義歯床用硬質裏装材
(義歯床用接着材料)
医療機器認証番号：
220ABBZX00334000



Q1 「クラリベース® キット」の特徴は？

A

操作がわかりやすい！

- レジンが重合硬化するにつれて色調が変化いたしますので、硬化の目安を目視で確認できます。
- 「接着材」を塗布した義歯床表面が滑沢になりますため、塗布した範囲を目視で確認できます。

ストレスフリー！

- 重合硬化後のレジン表面の硬化性に優れておりますため、バーに絡み難く切削性が良好です。
- 「接着材」を塗布した部分は優れた接着性を有しており、塗布していない部位はトリミングを容易に行えます。
- フッ素系メタクリル酸系モノマーを採用しておりますので、臭いを寄せつけにくく、清潔な裏装面を保つことが期待できます。

選べるバリエーション！

- 硬化のバリエーションが選べます。
「液剤」は『ファースト』と『ノーマル』の2種類がございますので、レジンの硬化時間を選択できます。
※最終硬化時間(混和開始から) ファースト：6分/ノーマル：8分30秒
- 色調のバリエーションが選べます。
「粉剤」は、淡い色調の『ピンク』とピンクに赤色繊維を入れた『ライブピンク』の2色から選択可能です。いずれの色調も義歯床の色を反映させやすい透明性を有しています。※「粉剤」は、「液剤」の『ノーマル』と『ファースト』に対して共通です。



ピンク ライブピンク

Q2 セット1箱の使用回数は？

A

部分床義歯の場合 … 約**47症例**(粉剤と液剤の割合が1目盛り対1目盛りの場合です。)
全部床義歯の場合 … 約**23症例**(粉剤と液剤の割合が2目盛り対2目盛りの場合です。)

Q3 最終硬化はどのように行いますか？口腔外で行う場合、硬化促進剤が必要ですか？

A

アンダーカットがなく口腔内で着脱できる義歯の場合は、トリミング後に口腔内に3分間再挿入し最終硬化させます。部分床義歯等でアンダーカットに入り込んだレジンをトリミングしても口腔内で着脱することができない場合は、50～60℃の温水に3分間浸漬し最終硬化させますが、硬化促進剤は不要です。

Q4 どのような材質の義歯にも使用できますか？

A アクリルレジン床、スルホン樹脂床(ポリカーボネート樹脂製に限る)及び金属床の裏装に使用できます。ポリカーボネート樹脂製義歯床以外のスルホン樹脂床(ポリスルホン樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂等)への裏装は接着性が低下し、裏装材が剥離する恐れがありますのでご使用はお避けください。なお、金属床にご使用される場合には、予めサンドブラスト処理、金属接着性プライマーの塗布を行いましてから「接着材」を塗布してください。

Q5 「接着材」が直ぐに揮発してしまうのですが、どうしたら良いですか？

A 揮発性の高い成分(ジクロロメタン)を採用しているため、キャップが開いたままになっていたりキャップの閉まりが緩い場合には揮発しやすくなります。お手数ですが、使用後は速やかにしっかりとキャップをお閉めください。
※ジクロロメタンを大量に吸入しますと、めまい、昏迷及び頭痛といった症状が現れる危険性がありますため、十分に換気を行いながらマスクを装着して使用してください。また、口腔内での塗布、乾燥は絶対に行わないでください。

Q6 「接着材」の塗布で使用した筆が固まってしまうのですが、専用の筆洗い液はありますか？

A 使用した小筆や小分け用カップは放置いたしますと硬化しますので、必ずMMA(即時重合レジン液剤)等で洗浄してください。

Q7 「クラリベース」で裏装した義歯に使用できない洗浄剤はありますか？

A 義歯洗浄剤の中には洗浄効果が非常に高く面荒れの原因となる製品もございますので、ご注意ください。

Q8 粉液混和直後の「クラリベース」のレジンがサラサラで盛り上げにくいのですが…。

A 混和直後のレジンには気泡が抜け易いようにサラサラした性状をしておりますが、ノーマルでは混和開始後15秒～1分30秒、ファーストでは混和開始後15秒～1分で盛り上げに適した流動性になります。(粉剤用計量カップはノーマルとファーストの2種類ありますので、ご使用される液剤に応じた計量カップをご使用ください。)なお、粉剤用計量カップは目盛りを幅を持たせておりますため、粉剤の採取量を目盛りの上限(垂れにくい)～下限(伸ばしやすい)の範囲で変えることにより、レジンの流動性を調整することができます。



●動画のページはこちらのURLよりご覧下さい ⇒ <http://www.kuraraynoritake.jp/movie/>

●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●印刷のため現品と色調が異なることがあります。●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。●本文中の「接着材」、「粉剤」及び「液剤」はそれぞれ「クラリベース® 接着材」、「クラリベース® 粉剤」及び「クラリベース® 液剤」を示します。



クリアフィル® クラブ

クラレ製品の使い方動画も見える「クリアフィルクラブ」 <http://clearfil.dental-plaza.com/>



製造販売 クラレノリタケ デンタル株式会社 新潟県胎内市金敷町2-28 〒959-2653 www.kuraraynoritake.jp

販売 株式会社モリタ 大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 Tel:06-6380-2525
 東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 Tel:03-3834-6161

www.dental-plaza.com