


# クリアフィル®クラブ 通信

Vol.20

## 「ティースメイト® F-1 2.0」について

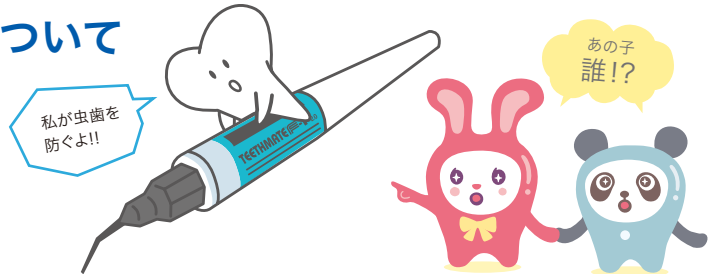

### Q1 どのような製品ですか。

**A** 光重合型のシーラント材です。主な特徴は下記の通りです。

#### フッ素徐放性ポリマー配合



MMA-MF共重合体(フッ素徐放性ポリマー)が含まれております。

#### 優れた接着性と操作性

リン酸エッチングの採用と接着性モノマー「MDP」の配合により、未切削エナメル質に対し優れた接着性を示します。また、適度なペーストの流動性により、専用アプリケーターにて直接小窩裂溝に填塞可能※です。

※使用時の感染防止のため、患者間での交差使用は避けて下さい。

※ティスポブラシは患者毎に交換して下さい。※アプリケーターは口腔内で使用した場合、患者毎に交換して下さい。

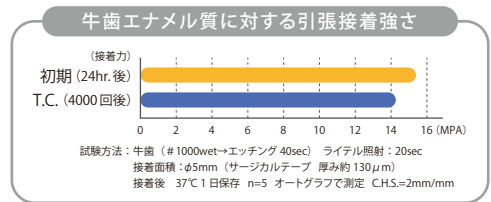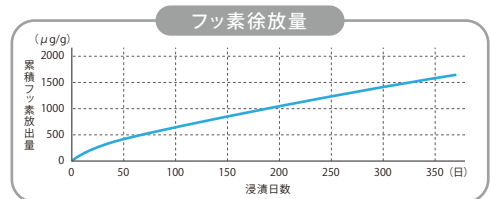

### Q2 使い方を教えてください。

**A** 下記イラストをご参考下さい。

- 冷蔵庫から出した直後はレジン充填材がゲル化していますので、必ず室温に戻してからご使用下さい。
- 白色(不透明)使用の際は、容器内の攪拌ボールがカチカチと聞こえる事を確認し、5秒以上激しく振ってからご使用下さい。

#### 使用方法の概要


<p><b>1 防湿、歯面の清掃</b></p> <p>ラバーダム装着により防湿を行った後、低速用ハンドピースに装着したブラシコーンで咬合面など填塞歯面を清掃します。</p>		<p><b>4 填塞</b></p> <p>レジン充填材容器にアプリケーターを装着し、填塞部位に填塞します。</p>	
<p><b>2 小窩裂溝の清掃</b></p> <p>エキスポローラーなどを用いて小窩裂溝内部を注意深く清掃します。</p>		<p><b>5 光照射、仕上げ</b></p> <p>所定の時間、照射し硬化させた後、表面の未重合層を水洗いして、除去します。</p>	

歯科重合用光照射器※	照射時間
従来型ハロゲン照射器 / LED照射器	<b>20秒</b>
高出力ハロゲン照射器 / プラズマアーク照射器	<b>10秒</b>


※使用可能な歯科重合用光照射器の条件については製品の添付文書をお読みください

### Q3 色調は何色ありますか。

**A** 赤色・無色(透明)・黄色・白色(不透明)の4色があり、必要に応じて選択できます。

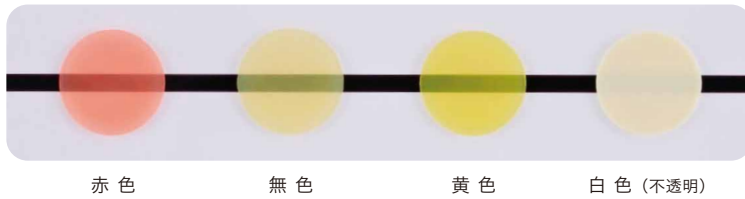

赤色 無色 黄色 白色(不透明)

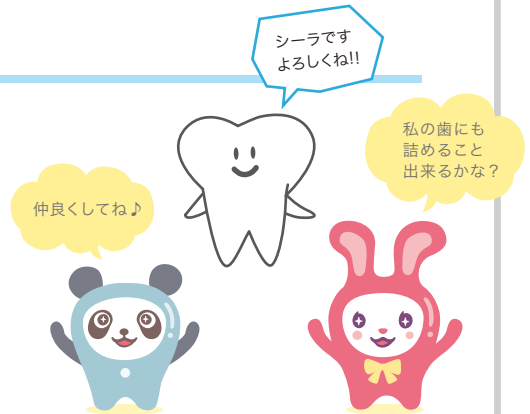

### Q4 白色(不透明)が分離している様な気がします。採取できません。

**A** 白色(不透明)は、歯質と近似した色調を再現するため、顔料を含有しております。この顔料が沈降すると、上澄みの透明な液のみが流出してしまいます。そのようなことを防ぐために、白色のみに攪拌ボールを入れております。ご使用前にシリンジをよく振っていただき、容器内の攪拌ボールがカチカチと聞こえることを確認し、5秒以上激しく振ってください。また、冷蔵庫より取り出した直後はレジン充填材がゲル化していますので、必ず室温に戻してからご使用ください。詳しくは、クラレノリタケデンタルWEBサイト『動画で見る製品』のコーナーをご覧ください。

### Q5 患者様に紹介する為の資料はありますか。

**A** シーラントとはどんな治療なのかを記載いたしました、患者様配布用のパンフレット(商品番号:242-761)が販売されております。30枚入りで¥700です。また、歯の萌出時にシーラントを行って頂くための、お知らせ用ハガキ(商品番号:242-827)もございます。(¥1,000 / 10枚入) どちらも(株)モリタにて販売しておりますので、是非ご活用下さい。



患者様配布用パンフレット



お知らせ用ハガキ



#### ティースメイト® F-1 2.0 キット

管理医療機器 高分子系歯科小窩裂溝封鎖材  
医療機器承認番号:21600BZZ00636000

#### ティースメイト® F-1 2.0

管理医療機器 高分子系歯科小窩裂溝封鎖材  
医療機器承認番号:21600BZZ00635000

●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●本文中のデータ測定はクラレノリタケデンタル株式会社によるものです。●印刷のため現品と色調が異なることがあります。●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。●価格は全てメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。●歯科重合用光照射器の有効波長域と光量につきましては添付文書をお読み下さい。



クリアフィル®クラブ

クラレ製品の使い方動画も  
見える「クリアフィルクラブ」

<http://clearfil.dental-plaza.com/>



製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社 新潟県胎内市金敷町2-28 〒959-2653  
[www.kuraraynoritake.jp](http://www.kuraraynoritake.jp)

販売 株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 Tel:06-6380-2525  
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 Tel:03-3834-6161

[www.dental-plaza.com](http://www.dental-plaza.com)