

# クリアフィル®クラブ 通信

Vol.24

## 「クリアフィル® マジェスティ® LV」 「クリアフィル® マジェスティ®」について

**Q1** 「クリアフィル® マジェスティ® LV」の特長を教えてください。

**A** フロアブルコンポジットレジンでありながら、強度とフロー性を両立し、様々な使用用途への対応が可能です。

- **白歯部咬合面にも対応可能!**  
フィラー含有量81wt%により強度が求められる白歯部咬合面の修復が可能です。
- **極細ノズルのニードルチップ!**  
内径0.56mmのニードルチップ採用で、MI窩洞にも充填しやすい良好な操作性を有しています。
- **採取量のコントロールがスムーズ!**  
本品は、糸引き・湧き出しを抑制する構造を有しています。
- **「流動性」と「付形性」の両立!**  
I級窩洞底部のライニング、辺縁隆線や咬合面形態の付与も良好です。
- **経過観察が容易!**  
X線造影性を有しておりますので、X線による確認が可能です。



クリアフィル® マジェスティ® LV

【前白歯共用】  
管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン  
医療機器認証番号:218ABBZX00162000

糸引き、湧き出しを抑制



**Q2** 「クリアフィル® マジェスティ®」の特長を教えてください。

**A** 単層充填においても優れた色調適合性により簡単・スピーディーな自然な色調表現が可能です。

- **歯質に近似した透過性及光拡散性を有しています。**
- **重合前後の色調・透過性変化が少ないため、充填時にイメージどおりの修復が可能です。**



硬化前後の色調

硬化前後での色調差はもちろん透明性変化もほとんどなく、イメージ通りの修復が可能です。



クリアフィル® マジェスティ®

【前白歯共用】  
管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン  
医療機器認証番号:21700BZZ00460000

### 簡便な操作性

- **良好な付形性を有し、べたつき難くインスツルメント離れに優れているため、思い通りの形態に表現が可能です。**



付形のよさ

伸ばし易い適度な硬さでインスツルメント離れが良好です。付形性にも優れておりますので、思い通りの形態に表現が可能です。

### Q3 「クリアフィル® マジェスティ® LV」と「クリアフィル® マジェスティ®」の色調について教えてください。

**A** 「クリアフィル® マジェスティ® LV」は全13色、「クリアフィル® マジェスティ®」は全16色と豊富な色調を取り揃えております。また、「クリアフィル® マジェスティ® LV」と「クリアフィル® マジェスティ®」の共通色においては、ペースト硬化後の色調は同等です。

#### ●「クリアフィル® マジェスティ® LV」と「クリアフィル® マジェスティ®」色調構成



#### ●「クリアフィル® マジェスティ® LV」「クリアフィル® マジェスティ®」の色調と特長

クリアフィル® マジェスティ® LV	クリアフィル® マジェスティ®	色調	特徴	透明性
●	●	A1, A2, A3, A3.5, A4	基本的な色調です。	3
-	●	B2, B3, C3	基本的な色調です。	3
●	●	E	透明性が高く歯冠色を多少持たせた色調でエナメル質の色調再現に適しています。	4
●	●	XL	透明性はEと同等で歯冠色を抑えた白っぽい色調です。	4
●	●	OC	透明性はボディ色と同等で色味を押さえた色調です。臼歯部咬合(オクルーザル)面の白濁した色調の再現に適しています。	3
-	●	T	マジェスティの中で一番透明性が高く色味を押さえた色調です。前歯切端部の症例に適しています。	5
-	●	HO	ホワイトニング後等の白い色調再現に適しています。	2
●	●	OA2, OA3, A4	ボディ色の色味に若干の遮蔽性が必要な場合に適しています。	2
●	-	乳歯色	乳歯色に近似していて白味が強い色調です。	2
●	-	サービカル	歯頸部の濃い色調の再現に適しています。	2



### Q4 金属色の遮蔽用のオペーク色はありますか？

**A** 「クリアフィル® マジェスティ® LV」と「クリアフィル® マジェスティ®」には、OA3、乳歯色、HOなど遮蔽性を有した色調がございますが、金属色や強い変色歯の色を遮蔽することはできませんので、必要に応じて、「クリアフィル® ST オペーカー」を先に用いてください。なお、上記の表における「クリアフィル® ST オペーカー」の透明性は「1」となります



クリアフィル® ST オペーカー

管理医療機器 歯科用色調遮蔽材料  
医療機器承認番号:16200BZZ00980000

### Q5 「クリアフィル® マジェスティ® LV」の「LV」の意味は？

**A** Low Viscosity (低粘度)の頭文字です。「クリアフィル® マジェスティ®」同様の硬さと色調適合性を有する低粘度レジン(フロアブルレジン)であることを意図しております。

●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●印刷のため現品と色調が異なることがあります。●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。



クラレ製品の使い方動画も  
見れる「クリアフィルクラブ」 <http://clearfil.dental-plaza.com/>



製造販売 クラレノリタケ デンタル株式会社 新潟県胎内市金敷町2-28 〒959-2653  
www.kuraraynoritake.jp

販売 株式会社モリタ 大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 Tel:06-6380-2525  
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 Tel:03-3834-6161

www.dental-plaza.com